

Ongeëvenaarde enzymatische reinigingskracht.

**EuroSept® Xtra Instrument
Enzymatic Cleaner Concentrate**



**WAARDE EN
KWALITEIT**



BETROUWBAAR



PRODUCTKEUZE

EuroSept® Xtra Instrument Enzymatic Cleaner Concentrate

Voordelen

- Voor de actieve reiniging van medische instrumenten alvorens deze te ontsmetten
- Geschikt voor ultrasoon bad
- Laagschuimende, niet-corrosieve formule die uiterst compatibel is met andere materialen
- Handige doseerflessen
- Geconcentreerde formule met het oog op minder verpakkingsmateriaal en meer duurzaamheid



Gebruiksaanwijzing

Gebruik deze oplossing om instrumenten die proteïne (bloed of speeksel) bevatten te reinigen alvorens deze te ontsmetten.

Instructies

Om 1L oplossing te bereiden, mengt u 980 ml water (max. 40°C) met 20 ml reiniger. Bij zware vervuiling moet u de instrumenten op voorhand mechanisch reinigen. Plaats de vervuilde instrumenten onmiddellijk geopend (open, niet gesloten) in de actieve oplossing. Alle te reinigen oppervlakken en holten moeten volledig zijn ondergedompeld in de oplossing. Als de oplossing troebel is of als er deeltjes in zweven, vervang deze dan. Vervang de oplossing minstens eenmaal daags. Spoel de instrumenten na het reinigen zorgvuldig en bij voorkeur met gedemineraliseerd water, droog ze af en ontsmet ze met ontsmettingsproducten. Gelieve de herverwerkingsinstructies van de fabrikant van het instrument te raadplegen. Deze reinigungsoplossing kan ook worden gebruikt in een ultrasoon bad. Meng ze niet met detergents of ontsmettingsmiddelen. De gebruiksklare oplossing mag in afvalwater worden geloosd. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Fysieke gegevens

Toepassingsconcentratie	0,5-1% voor normale vervuiling en max. 5% voor zware vervuiling
Blootstellingsduur	5-30 min. naargelang de vervuilingsgraad
Bevat	< 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, enzymen, geuren

EuroSept Xtra enzymatisch reinigungsconcentraat voor instrumenten

1L.....Artikelnr. 9884858

5L.....Artikelnr. 9884236