

EUROSEPT® XTRA WATERLINE S



KRACHTIG WERKENDE oplossing speciaal ontwikkeld voor het gemakkelijk verminderen van bacterievorming in de smallere waterleidingen van de behandel eenheid.

Voordelen

- Voorkomt opbouw van biofilm
- Ondersteunt bacteriereductie
- Materiaalvriendelijk*
- Milieuvriendelijk


* Druppels op oppervlakken (vooral op leder en kunstleder) direct met water verwijderen om vlekken te voorkomen.

BESCHERM UW PRAKTIJK IN DEZE SIMPELE STAPPEN



STAP 1

Kies het product dat geschikt is voor uw behandel eenheid.

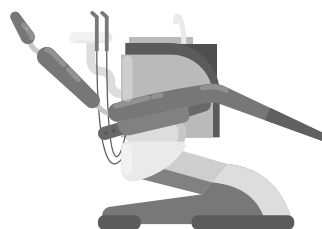

STAP 2


Voeg toe aan het water in de behandel eenheid voor continue ontsmetting bij 1,0% verdunning.



STAP 3

Voor intensieve bacteriereductie voorafgaande weekenden en feestdagen. Spoel de leidingen met de onverdunde vloeistof en laat deze minstens 24 uur inwerken. Vervolgens spoelen met water voordat de eerste behandeling van een patiënt aangevangen wordt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

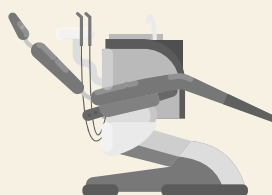

• AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM VAN DENTSPLY SIRONA BEHANDELEENHEDEN (BIJV. TENEO, SINIUS, INTEGRO PRO, M1+, C2+, C4+, C5+, C5+ TURN) •

EuroSept® Xtra Waterline S

Bevat: Fles, 1 liter
(9884288)

Ingrediënten

Waterstofperoxide, concentraat: 1,41%.



**WAARDE EN
KWALITEIT**



**UITGEBREIDE
PRODUCTSELECTIE**



**EERLIJK EN
BETROUWBAAR**