

EUROSEPT® XTRA WATERLINE K6



KRACHTIG WERKENDE oplossing speciaal ontwikkeld voor het gemakkelijk verminderen van bacterievorming in de smallere waterleidingen van de behandel eenheid.

Voordelen

- Voorkomt opbouw van biofilm
- Ondersteunt bacteriereductie
- Materiaalvriendelijk*
- Milieuvriendelijk


* Druppels op oppervlakken (vooral op leder en kunstleder) direct met water verwijderen om vlekken te voorkomen.

BESCHERM UW PRAKTIJK IN DEZE SIMPELE STAPPEN



STAP 1

Kies het product dat geschikt is voor uw behandel eenheid.

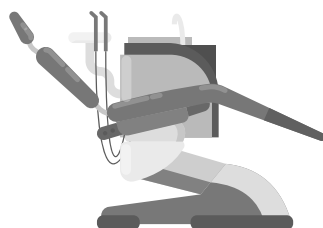

STAP 2


Voeg toe aan het water in de behandel eenheid voor continue ontsmetting bij 0,5% verdunning.



STAP 3

Voor intensieve bacteriereductie voorafgaande weekenden en feestdagen. Spoel de leidingen met 4% verdunde vloeistof en laat deze minstens 24 uur inwerken. Vervolgens spoelen met water voordat de eerste behandeling van een patiënt aangevangen wordt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

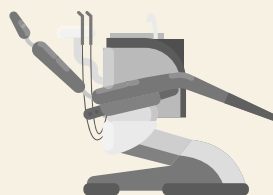

- KANT-EN-KLARE VLOEISTOF VOOR HET AUTOMATISCHE DOSEERSYSTEEM VAN KAVO BEHANDELEENHEDEN •

EuroSept® Xtra Waterline K6

Bevat: Fles, 1 liter
(9884289)

Ingrediënten

Waterstofperoxide, concentraat: 6%.



WAARDE EN
KWALITEIT



UITGEBREIDE
PRODUCTSELECTIE



EERLIJK EN
BETROUWBAAR