
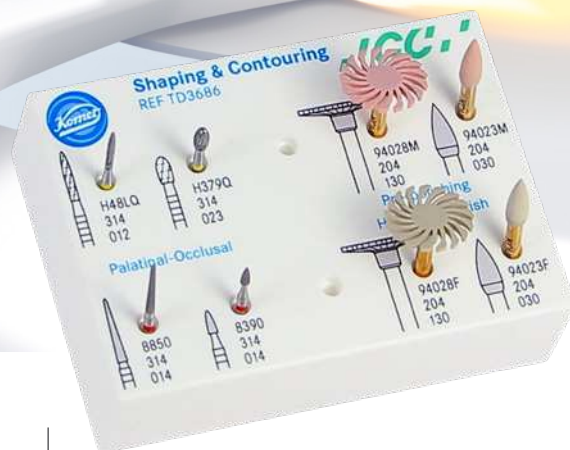


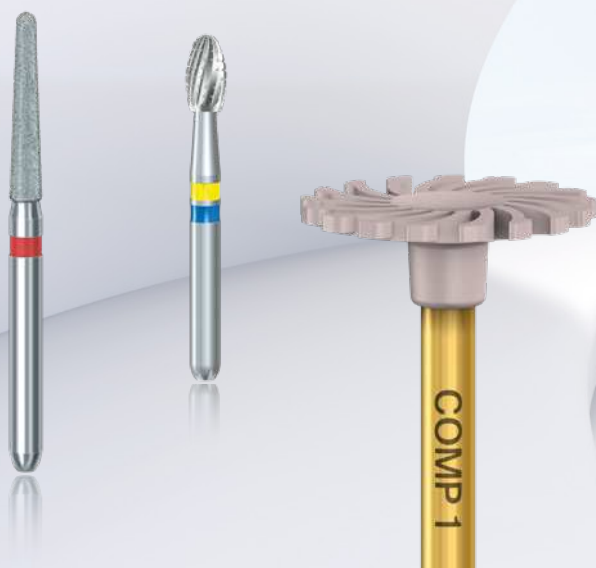

Shaping & Contouring.

Façonnage des restaurations composites.

Etape 1 Denture Q - Fraises diamantées bague rouge

Mise en forme et pré-polissage des restaurations composite.

Avantages des fraises Denture Q :

- Une fraise unique pour la mise en forme et le polissage
- Meilleur état de la surface grâce à sa denture surtaillée
- Grande longévité

Avantages des fraises diamantées :

- Elimination optimale des substances
- Des surfaces fines sans rayures

Etape 2 Polissoirs roses KometLine

Le polissoir diamanté rose est particulièrement adapté pour la réalisation des retouches donnant ainsi un polissage optimal des surfaces.

Etape 3 Polissoirs beiges KometLine

Le polissoir beige sera utilisé pour obtenir un brillantage parfait.

Avantages des polissoirs :

- Brillantage en seulement 2 étapes
- Flexibilité et longévité grâce au liant en polyuréthane
- S'adaptent parfaitement à toutes les surfaces



H48LQ.314.012
Forme flamme (vestibulaire)

H379Q.314.023
Forme oviforme (occlusal)

8850.314.014
Polissage, 66 microns
Forme congé ¼ de rond long,
pointe arrondie (vestibulaire)

8390.314.014
Polissage 66 microns
Forme grenade (occlusal/
petites fissures)

94028M.204.130
Spirale (à utiliser sur des
surfaces mouillées)

94023M.204.030
Pointe (à utiliser sous spray
min. 50 ml/min.)

94028F.204.130
Spirale (à utiliser sur des
surfaces mouillées)

94023F.204.030
Pointe (à utiliser sous spray
min. 50 ml/min.)

Conseils d'utilisation :

- **H48LQ.314.012** ☉_{opt} 20 000 min⁻¹/rpm
- **H379Q.314.023** ☉_{opt} 20 000 min⁻¹/rpm
- **8850.314.014** ☉_{opt} 20 000 min⁻¹/rpm
- **8390.314.014** ☉_{opt} 20 000 min⁻¹/rpm
- **94023M.204.030** ☉_{opt} 6 000 min⁻¹/rpm
- **94023F.204.030** ☉_{opt} 6 000 min⁻¹/rpm
- **94028M.204.130** ☉_{opt} 6 000 min⁻¹/rpm
- **94028F.204.130** ☉_{opt} 6 000 min⁻¹/rpm

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

Maaïke Meeuwsen, Country Manager | BE-NE · E-Mail: mmeeuwsen@kometdental.de · Mobile +32 473 214376





Shaping & Contouring.

Vormgeving van composietrestauraties.

Stap 1 Q-finischers – Diamant afwerking boren

Vormgeven en voor-polijsen van composietrestauraties.

Voordelen van de Q-finischers:

- Eén meerbladige boor voor vormgeven en polijsten
- Betere oppervlakteafwerking dankzij de speciale cross-cut van de bladen
- Lange levensduur

Voordelen van diamant boren :

- Optimale verwijdering van oneffenheden
- Fijne oppervlakken zonder krassen

Stap 2 KompoLine roze polishers

De roze diamantpolijsters zijn bijzonder geschikt voor het bijwerken en polijsten van het oppervlak.

Stap 3 KompoLine beige polishers

De beige diamantpolijster wordt gebruikt voor een perfecte hoogglans.

Voordelen van de polishers:

- Polijsten in slechts 2 stappen
- Flexibiliteit en duurzaamheid dankzij een polyurethaan bindmiddel
- Perfect geschikt voor alle oppervlakken



H48LQ.314.012
Vlam vorm (vestibulaire)

H379Q.314.023
Ovale vorm (occlusaal)

8850.314.014
Polijsten, 66 micron
Conisch lang ¼ de rond,
afgeronde punt (vestibulaire)

8390.314.014
Polijsten, 66 micron
Granaat vorm (occlusaal/
fissuren)

94028M.204.130
Spiraal (voor gebruik op natte
oppervlakken)

94023M.204.030
Puntje (voor gebruik met water-
koeling min. 50 ml/min.)

94028F.204.130
Spiraal (voor gebruik op natte
oppervlakken)

94023F.204.030
Puntje (voor gebruik met water-
koeling min. 50 ml/min.)

Gebruiksaanwijzing:

- **H48LQ.314.012** $\odot_{opt}$ 20 000 min⁻¹/rpm
- **H379Q.314.023** $\odot_{opt}$ 20 000 min⁻¹/rpm
- **8850.314.014** $\odot_{opt}$ 20 000 min⁻¹/rpm
- **8390.314.014** $\odot_{opt}$ 20 000 min⁻¹/rpm
- **94023M.204.030** $\odot_{opt}$ 6 000 min⁻¹/rpm
- **94023F.204.030** $\odot_{opt}$ 6 000 min⁻¹/rpm
- **94028M.204.130** $\odot_{opt}$ 6 000 min⁻¹/rpm
- **94028F.204.130** $\odot_{opt}$ 6 000 min⁻¹/rpm

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Maaïke Meeuwsen, Country Manager | BE-NE · E-Mail: mmeeuwsen@kometdental.de · Mobile +32 473 214376

